



# DERMCOAT

Cobertura Membrana de Celulose

---

# DERMCOAT

## Cobertura Membrana de Celulose



Biocurativo à base de Membrana de Celulose para cobertura e tratamento de feridas. Material apresentado em formato de película lisa ou perfurada com micro furos transparente, produto estéril.

### APLICAÇÃO

- Indicado para tratamento de feridas, como queimaduras de primeiro e segundo grau, leitos ungueais, úlceras, úlceras venosas ou arteriais, dermo abrasões e escoriações.

### MODO DE USO

Higienize a ferida preferencialmente com Biguasol 0,2%, posteriormente aplique uma camada de Biguagel 0,2% conforme orientação do profissional de saúde, após isso, aplique o **Dermcoat** sobre a lesão cobrindo todo o ferimento com uma sobra de aproximadamente 1 cm além da borda. Remova eventuais bolhas de ar com suave compressão com gaze umedecida.

Mantenha a área lesionada imóvel após a aplicação por até 15 minutos, recorte as bordas se necessário.

### APRESENTAÇÃO:

*Películas medindo 7,5x5cm; 10x7,5cm; 15x10cm; 18x12cm; 20x15cm.*



[www.gamanpharma.com.br](http://www.gamanpharma.com.br)

 @gamanpharma

 contato@gamanpharma.com.br